

製品仕様

製品構成

・タブレット表示器 1台 ・タブレット用 AC 充電アダプタ 1個
・FWT L10-5 リニアプローブ1台 ・プローブ用AC充電アダプタ1個
・タブレット-プローブ間通信ケーブル1本

主な仕様

表示モード	Bモード／カラードプラ
アプリケーション	PV穿刺モードPlus、肺エコーガイド、マルチビュー機能、C@RNACORE連携機能、DICOM接続機能
出力形式	静止画:PNG、JPEG、DICOM(オプション) 動画:MP4
起動時間	20秒以下※1
走査方式	リニア走査
バッテリー充電時間	完全放電から4時間以内
バッテリー動作可能時間	3時間以上(連続スキャン時間)※2
その他	スリープ機能

タブレット(大)

名称	iViz air Ver.5 大画面タブレット表示器
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約 246 × 約 170 × 約 8.2mm
重量	約 491g

タブレット(小)

名称	iViz air Ver.5 タブレット表示器
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約 70 × 約 152 × 約 8.0mm
重量	約 158g

プローブ

名称	FWT L10-5 リニアプローブ
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約 57.9 × 約 170.5 × 約 29.0mm
重量	約 147g
周波数帯域	5～10MHz

※1: プローブ電源OFF、タブレットスリープ状態から、プローブ電源ボタン押下でタブレットスリープ解除、アプリを立ち上げ、Bモード画面が表示されるまでの時間。ただし電圧状態は良好なものとします。
※2: 新品のバッテリー、常温、デフォルト設定、バッテリーフル充電状態の場合。※ 製品には汎用のタブレット表示器を使用しているため、外観や仕様等が予告なく変更されることがあります。※ 付属のケーブルでタブレットとプローブを接続し、有線で使用することも可能です。

サポートプランのご案内

	導入	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
		メーカー保証				
3年サポートプラン		導入～3年目までの事故や落下故障 [※] 突発故障をサポートします			2年延長可能 (3年サポートを2年間延長します)	
5年サポートプラン			導入～5年目までの事故や落下故障 [※] 突発故障をサポートします			
プラン・金額詳細は営業担当までお問い合わせください。	※ お客さま起因で発生した故障について、契約期間中の1回目は全額補償、2回目は修理費用の50%補償、3回目以降は全額お客さまのご負担となります。※ 上記サポートプランには、バッテリーなどの消耗品の費用は含まれておりません。					

●ワイヤレス超音波画像診断装置 iViz air
販売名:FWUシリーズ 認証番号:301ABBZX00003000
●C@RNACORE
販売名:富士画像診断ワークステーション CC-WS674型 認証番号:22200BZX00909000
iVizは、FUJIFILM SonoSite, Inc. の商標です。
Zoomは、Zoom Video Communications, Inc. の商標です。

注意

●外観仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。●詳細な仕様については、弊社にお問い合わせください。●ご使用に関しては、製品添付の取扱説明書をお読みください。

プローブ実物大サイズ

タブレット(大)実物大サイズ

タブレット(小)実物大サイズ



iViz air
Linear



詳細はこちら



iViz air
Convex



詳細はこちら

コンベックスプローブを同時または、後で追加購入する事もできます。

FUJIFILM

製造販売業者
富士フイルム株式会社

販売業者
富士フイルム メディカル株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士フイルム西麻布ビル
iViz air コールセンター:0800-888-8806 受付時間 9:00～18:00(平日)

販売業者

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社
Tel: 0120-998-971
medtronic.co.jp

iViz air V5 リニア CVJ(4P)-2312-FP(KP)-3000-1

FUJIFILM
Value from Innovation



タブレットもアプリも
用途に合わせて自由に選択可能

01 iViz air Linear



02 Tablet size

6.1
インチ

or

10.1
インチ



03 Application

Assist

- ☐ PV穿刺モードPlus
- ☐ 肺エコーガイド

Connect

- ☐ マルチビュー機能
- ☐ 多彩な連携機能

必要な機能だけを、もっと自由に。

iViz air -Ver.5-
Linear

■ AI技術を活用した「PV穿刺モードPlus」※

※AI技術のひとつであるディープラーニングを活用して設計したPV穿刺モードPlus ※こちらの機能はオプションです

富士フイルムAI技術ブランド **REiLi**

必要な機能だけを、もっと自由に。


タブレットとアプリを選んで自由にカスタマイズ

あらゆる現場の診断に安心な高画質と軽量性、長時間バッテリー搭載。PV 穿刺時の静脈の抽出や静脈径に応じたマーカー表示など、各種機能もさらに充実しました。エコー初学者から熟練者まで、毎日の診察をアシストいたします。

01 視認性に優れた薄型設計・ポケットエコー


視認性に優れた薄型形状

先端部を限界まで薄く設計。穿刺針の刺入位置をスムーズに確認できます。

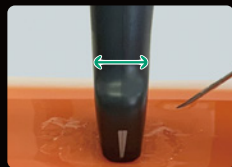

感染症リスクにも対応

タブレット／プローブにカバーをかぶせて操作が可能。

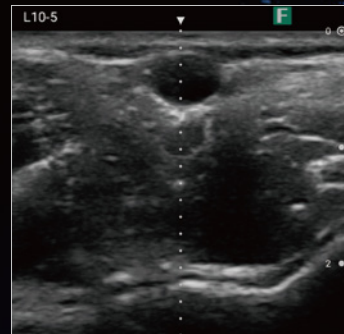

上腕動脈 センターライン表示可能





02 タブレットは2つのサイズから選択が可能

6.1インチ

10.1インチ

タブレットサイズは持ち運びに便利な6.1インチと、視認性に優れた10.1インチの2種類を用意。使用用途に合わせてお選びいただけます。

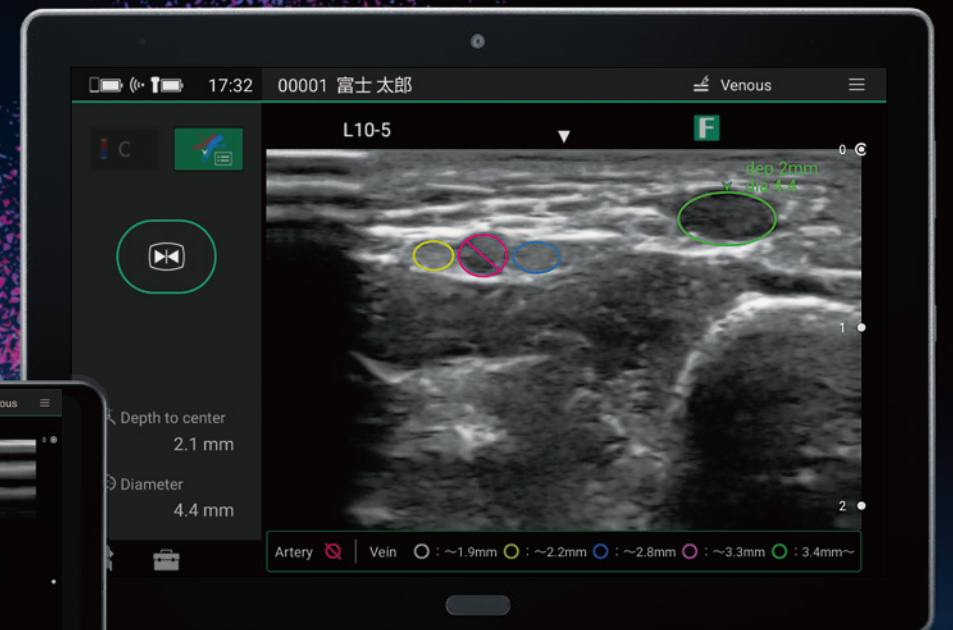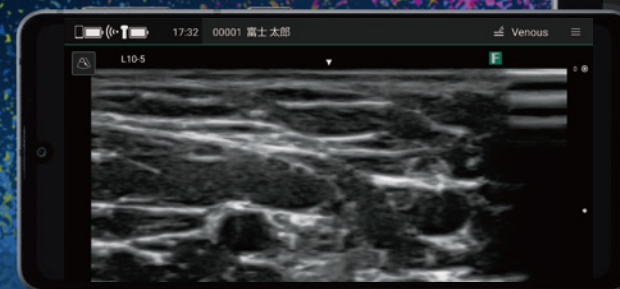

03 診断をサポートする多彩なアプリケーション (オプション)



PV穿刺モードPlus

Powered by
REiLi

AI(人工知能)の一つであるディープラーニングを設計に用いて開発した「血管判別アシストモード」を搭載。2種のモードでより迅速かつ的確なエコーガイド下穿刺をアシストします。

血管判別アシストモード


上肢末梢の動静脈をリアルタイム判別。血管までの深さと径を自動計測。さらに血管径に応じて異なる色のマーカーを表示し、視認性を向上させました。

全画面表示モード※


画面の横幅を最大限に利用して、末梢血管などの浅層を大きく表示することが可能です。 ※こちらのモードは開発にAI技術を使用しておりません

画像処理アルゴリズム 「クリアビジュアライゼーションPlus」を搭載


イメージギャラリー

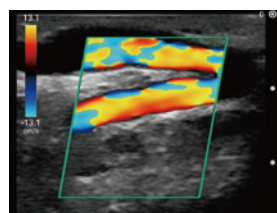


カラードプラ 吻合部

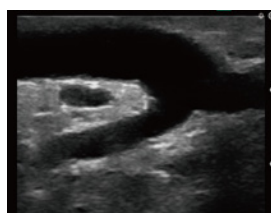

きれいな吻合部Bモード

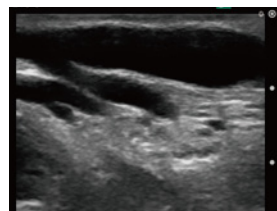


交通枝

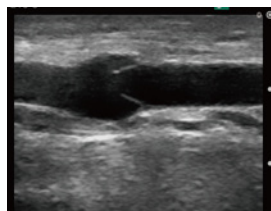


静脈弁




肺エコーガイド

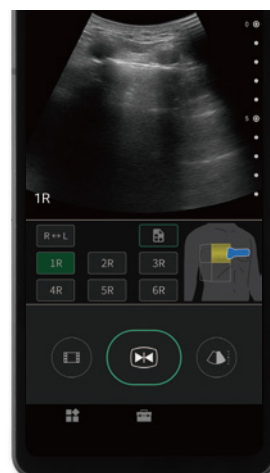

肺エコーの走査手順を視覚的にアシスト。走査プロトコルはBLUE protocol (片肺6箇所)とPOCUS protocol (片肺4箇所)から選択可能。ガイドに沿って走査、画像所見を選択することで肺全体の検査レポートを簡単に作成できます。

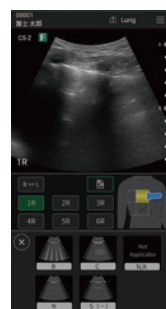


アノテーション選択

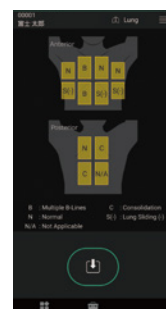

レポート保存



マルチビュー機能

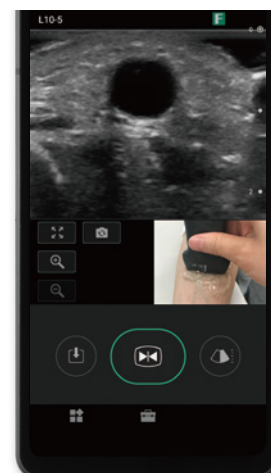

エコー画像とカメラ画像を同時に表示し、1つの画像として保存可能。カメラ画像をBody Markの代わりにする、手技を上級医に確認してもらう、プローブ走査法の教育のための参考画像にするなど、さまざまな使い方が可能です。



タテ/ヨコ向き、それぞれに対応



多彩な連携機能

- USBメモリダイレクト出力
- オーダー連携&DICOM出力 (オプション)
- SNS共有機能

- 検査ネットワーク出力
- C@RNACORE連携 (オプション)
- Zoom共有機能

製品の詳細な情報はWebサイトをご確認ください。



●接続するネットワークおよびルーターなど、施設側の環境はお客様でご準備いただく必要があります。
●本写真にはシステムに含まれないものやオプション品があります。詳しくはお問い合わせください。
※ 詳細はお問い合わせください。

製品仕様

製品構成

・タブレット表示器 1台 ・タブレット用 AC 充電アダプタ 1個
・FWT C5-2 コンベックスプローブ1台・プローブ用AC充電アダプタ1個
・タブレット-プローブ間通信ケーブル1本

主な仕様

表示モード	Bモード
アプリケーション	膀胱尿量自動計測、直腸観察ガイドPlus、 肺エコーガイド、マルチビュー機能、 C@RNACORE連携機能、DICOM接続機能
出力形式	静止画:PNG、JPEG、DICOM(オプション) 動画:MP4
起動時間	20秒以下※1
走査方式	コンベックス走査
バッテリー充電時間	完全放電から4時間以内
バッテリー動作可能時間	3時間以上 (連続スキャン時間) ※2
その他	スリープ機能

タブレット(大)

名称	iViz air Ver.5 大画面タブレット表示器
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約 246 × 約 170 × 約 8.2mm
重量	約 491g

タブレット(小)

名称	iViz air Ver.5 タブレット表示器
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約 70 × 約 152 × 約 8.0mm
重量	約 158g

プローブ

名称	FWT C5-2 コンベックスプローブ
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約72.8 × 約178.5 ×約29.0mm
重量	約190g
周波数帯域	2～5MHz

※1: プローブ電源OFF、タブレットスリープ状態から、プローブ電源ボタン押下でタブレットスリープ解除、アプリを立ち上げ、Bモード画面が表示されるまでの時間。ただし電波状態は良好なものとする。
※2: 新品のバッテリー、常温、デフォルト設定、バッテリーフル充電状態の場合。※ 製品には汎用のタブレット表示器を使用しているため、外観や仕様等が予告なく変更されることがあります。※ 付属のケーブルでタブレットとプローブを接続し、有線で使用することも可能です。

プローブ実物大サイズ

タブレット(大)実物大サイズ

タブレット(小)実物大サイズ



iViz air
Convex



詳細はこちら

サポートプランのご案内

	導入	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
		メーカー保証				
3年サポートプラン		導入～3年目までの事故や落下故障 [※] 突発故障をサポートします			2年延長可能 (3年サポートを2年間延長します)	
5年サポートプラン			導入～5年目までの事故や落下故障 [※] 突発故障をサポートします			
プラン・金額詳細は営業担当までお問い合わせください。		※ お客さま起因で発生した故障について、契約期間中の1回目は全額補償、2回目は修理費用の50%補償、3回目以降は全額お客さまのご負担となります。※ 上記サポートプランには、バッテリーなどの消耗品の費用は含まれておりません。				

●ワイヤレス超音波画像診断装置 iViz air
販売名:FWUシリーズ 認証番号:301ABBZX00003000
●C@RNACORE
販売名:富士画像診断ワークステーション CC-WS674型 認証番号:22200BZX00909000
iVizは、FUJIFILM SonoSite, Inc. の商標です。
Zoomは、Zoom Video Communications, Inc. の商標です。

リニアプローブを同時または、後で追加購入する事もできます。



iViz air
Linear

詳細は
こちらから



注意

●外観仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。●詳細な仕様については、弊社にお問い合わせください。●ご使用に関しては、製品添付の取扱説明書をお読みください。

FUJIFILM

製造販売業者
富士フイルム株式会社

販売業者
富士フイルム メディカル株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士フイルム西麻布ビル
iViz air コールセンター:0800-888-8806 受付時間 9:00～18:00(平日)

販売業者

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社
Tel: 0120-998-971
medtronic.co.jp

iViz air V5 コンベックス CVJ(4P)-2312-FP-PDF-1

FUJIFILM
Value from Innovation



タブレットもアプリも
用途に合わせて自由に選択可能

01 iViz air Convex



+

02 Tablet size

6.1
インチ

or

10.1
インチ

+

03 Application

Assist

- ☐ 膀胱尿量自動計測
- ☐ 直腸観察ガイドPlus
- ☐ 肺エコーガイド

Connect

- ☐ マルチビュー機能
- ☐ 多彩な連携機能

必要な機能だけを、もっと自由に。

iViz air -Ver.5-
Convex

■ AI技術を活用した「膀胱尿量自動計測機能」、「直腸観察ガイドPlus」※

※AI技術のひとつであるディープラーニングを活用して設計した膀胱尿量自動計測機能／直腸観察ガイドPlus ※これらの機能はオプションです



必要な機能だけを、もっと自由に。


タブレットとアプリを選んで自由にカスタマイズ

「聴診器のように超音波を持ち歩く時代へ」をコンセプトにしたポータブルエコー iViz air が、より便利に、よりお求めやすくなりました。長時間バッテリーのプロープ、2サイズのタブレット、そして多彩なアプリ。組み合わせは自由自在。エコー初学者から熟練者まで、毎日の診察をアシストいたします。

01 高精細と機動力を両立した、ポケットエコー



● 画像処理アルゴリズム「クリアビジュアライゼーションPlus」を搭載

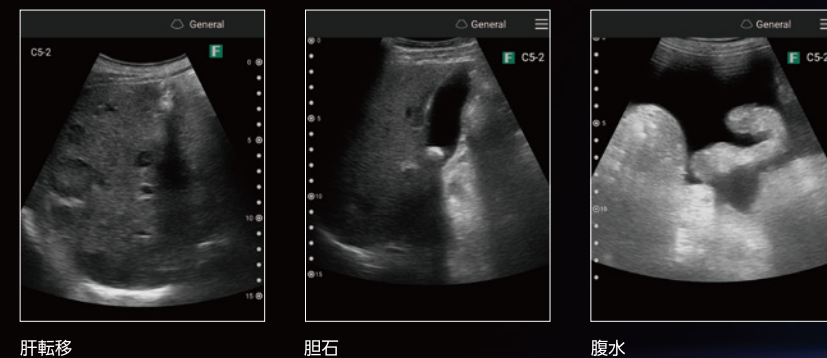

肝転移

胆石

腹水

感染症リスクにも対応

タブレット／プロープにカバーをかぶせて操作が可能。




02 タブレットは2つのサイズから選択が可能


6.1インチ

10.1インチ

タブレットサイズは持ち運びに便利な6.1インチと、視認性に優れた10.1インチの2種類を用意。使用用途に合わせてお選びいただけます。

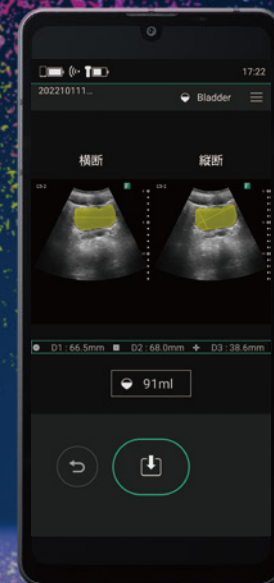

膀胱尿量自動計測

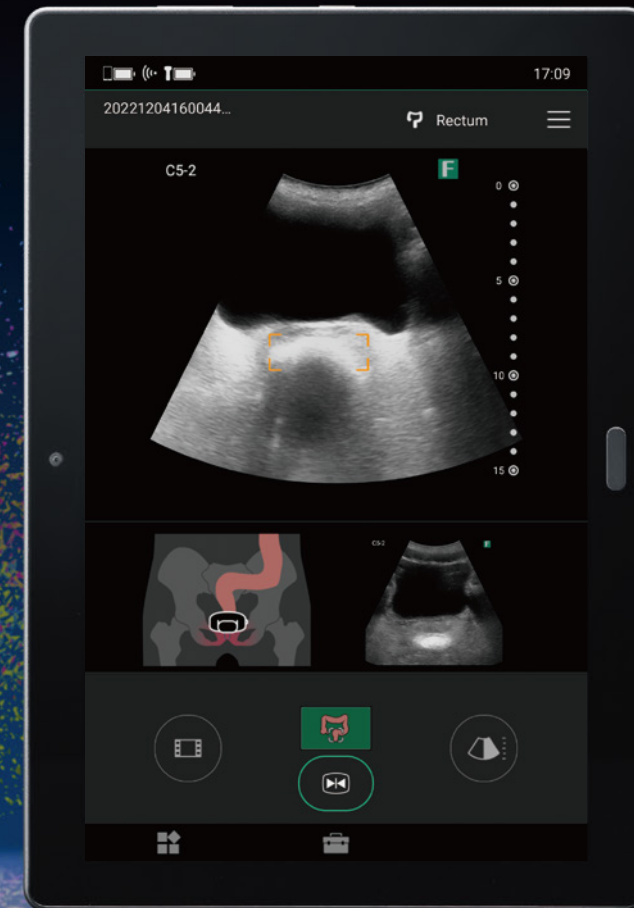

直腸観察ガイドPlus

03 診断をサポートする多彩なアプリケーション

(オプション)

Powered by REiLi



膀胱尿量
自動計測




直腸観察
ガイドPlus


REiLiは富士フイルムが開発を進めるAI技術ブランドです。




膀胱尿量自動計測

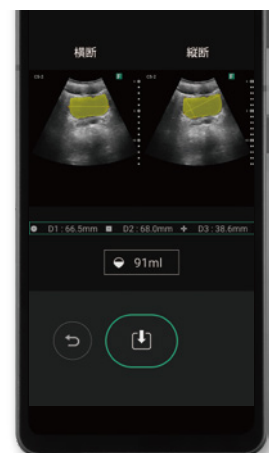

AI技術の一つであるディープラーニングを使用して開発。自動描出された膀胱領域にキャリパーを自動配置し、尿量を自動算出。膀胱内に貯留した尿量を簡便に短時間で自動計測できます。

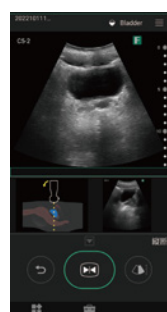

ガイド表示

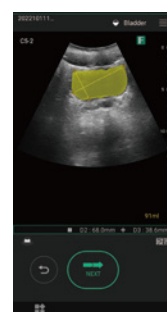


自動計測




直腸観察ガイドPlus



AI技術の一つであるディープラーニングを使用して開発。便あるいは空虚な直腸をリアルタイムにマーキングし、検出をサポートします。「便なし」「便あり」「硬便」の典型的な画像を参考にしながら便性状の評価が可能です。所見はアノテーションとして付与することができます。

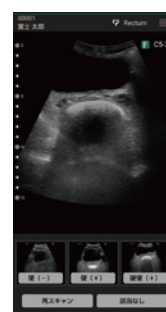

アノテーション選択

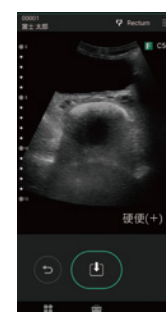

レポート保存



肺エコーガイド

肺エコーの走査手順を視覚的にアシスト。ガイドに沿って走査、画像所見を選択することで肺全体の検査レポートを簡単に作成できます。



マルチビュー機能

エコー画像とカメラ画像を同時に表示し、1つの画像として保存可能。カメラ画像をBodyMarkの代わりにするなどさまざまな使い方が可能です。



多彩な連携機能

■USBメモリダイレクト出力
■オーダー連携&DICOM出力
(オプション)
■SNS共有機能

■検査ネットワーク出力
■C@RNACORE連携
(オプション)
■Zoom共有機能

製品の詳細な情報はWebサイトをご確認ください。



●接続するネットワークおよびルーターなど、施設側の環境はお客様でご準備いただく必要があります。
●本写真にはシステムに含まれないものやオプション品があります。詳しくはお問い合わせください。
※ 詳細はお問い合わせください。